

正しいセンサカバーを使用してください（ムラタ編）

■ 純正品以外のカバーだと正しく測定できません

当社標準検体（生理食塩水含侵不織布使用）でカバーを変えて測定



当社製



ムーカス値：31.6

他社(ライフ)製




ムーカス値：24.4

クレラップ(呉羽化学工業製)



ムーカス値：41.2

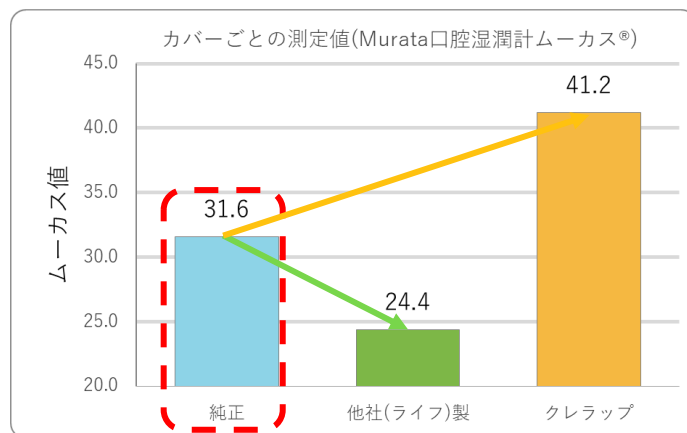

※カットしたフィルムを検体に乗せてセンサを押し付けています
測定値はいずれも3回測定の平均値です

Murata口腔湿潤計ムーカス®は当社製カバーと合わせて使用する事で正しい測定値を示します

正しいセンサカバーを使用してください（ライフ編）

■ 純正品以外のカバーだと正しく測定できません

当社標準検体（生理食塩水含侵不織布使用）でカバーを変えて測定



ライフ社製(純正)



ムーカス値：30.5

他社(村田)製




ムーカス値：34.5

クレラップ(呉羽化学工業製)



ムーカス値：41.6

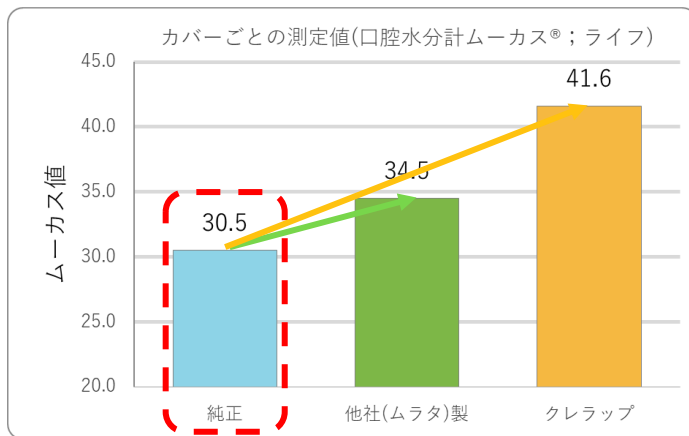

※カットしたフィルムを検体に乗せてセンサを押し付けています
測定値はいずれも3回測定の平均値です

ライフ製口腔水分計ムーカス®も純正カバーと合わせて使用する事で正しい測定値を示します